

Bausch & Lomb ReNu®

ボシュロム レニュー

ソフトコンタクトレンズ用 液体タンパク質除去剤 主成分：タンパク質分解酵素

レニュー・デイリー・プロテイン・リムーバー



毎日・簡単!

タンパク質除去でレンズはいつもクリア

レニュー・デイリー・プロテイン・リムーバーは、レニュー〈ソフトコンタクトレンズ用消毒剤〉に毎日一滴加えて使用することにより、レンズの消毒とタンパク質除去を同時に行うことができる、ソフトコンタクトレンズ用液体タンパク質除去剤です。本剤はグループI~IVのすべてのソフトコンタクトレンズに使えます。


ソフトコンタクトレンズは装用期間の経過とともに、タンパク質等がレンズ表面に固着して白濁や変色が生じたり、装用感が悪くなることがあります。レニューによる毎日の洗浄・消毒にレニュー・デイリー・プロテイン・リムーバーを加えることにより、酵素のはたらきで付着したタンパク質を分解除去することができます。毎日の簡単なケアでレンズの快適な装用感を導きます。

【使用方法】

※文中の「レニュー」はレニュー〈ソフトコンタクトレンズ用消毒剤〉を示します。

1. レンズケースにレニューを満し、本剤を左右1滴ずつ（厳守）加えます。

●本剤を2滴以上加えないように注意してください。

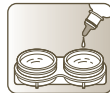

2. 手を石けんでよく洗います。はずしたレンズを手のひらにのせ、レニューを3~5滴落として片面を人差し指で約10秒間ていねいにこすり洗います。裏面もレニューを3~5滴落として約10秒間こすり洗います。



3. 手のひらにレンズが十分に浸る量のレニューをためて、レンズの両面を片面につき約10秒間すすぎ、レンズ表面の残留物を充分に取り除きます。

4. レンズケースにレンズを入れ、キャップをしっかりとしめます。中の液が混ざるようにレンズケースを軽く振ります。少なくとも4時間この状態で放置します（この間に消毒とタンパク質除去が完了します）。

●レンズを12時間以上本剤の入った液中に浸しておくことは避けてください。

5. 所定の時間経過後、レンズケースからレンズを取り出し、レニューで十分にすすいでから装用します。



*レンズを取り出した後のレンズケースは空にして、水道の流水でケース内をよくこすり洗いしてからすすぎ、自然乾燥させてください。

（海外等で使用される場合には、レンズケースはレニューで洗浄し、自然乾燥させてください。）

*一度使用した液の再使用はできません。

*すぐにレンズを装用しない場合には、自然乾燥させた別のレンズケースに、新しいレニューを入れてレンズを保存してください。

裏面も必ずお読みください。

コンタクトレンズ及びケア用品をご使用の際は眼科医の指示に従い、それぞれの添付文書をよく読み、正しい使用方法を守ってください。誤った使用法はレンズの劣化を早めたり、眼に障害を起こす原因となることがあります。また、添付文書は必要な時に読めるように大切に保管してください。

使用上の注意

1. 使用に際し次のことに注意してください。


- (1) 本剤は、レニュー〈ソフトコンタクトレンズ用消毒剤〉に加えてお使いください。またご使用に際しては、本剤及びレニューの使用説明書をよくお読みください。(本剤はレニュー マルチプラスともお使いいただけます。)
- (2) 開封時に、キャップに封印フィルムが巻かれていない製品は絶対に使用しないでください。
- (3) レンズを取り扱う前に必ず手を石けんでよく洗ってください。
- (4) レンズをはずしたら必ずすぐに洗浄と消毒を行ってください。汚れはすぐに洗浄しないと固着してとれなくなることがあります。また、洗浄と消毒を怠るとレンズに汚れが蓄積し、カビや細菌が繁殖する原因になります。
- (5) レンズケースはいつも清潔にしてください。レンズケースが汚れているとレンズにカビや細菌が繁殖する原因になります。レンズを取り出した後のレンズケースは空にして、水道の流水でケース内をよくこすり洗いしてからすすぎ、自然乾燥させてください。
- (6) レンズケースは長期間使用していると汚れなどの蓄積により細菌の繁殖をまねくことがありますので、定期的に変換することをお勧めします。

2. 使用中または使用後は次のことに注意してください。

- (1) 本剤はコンタクトレンズのケアのみに使用し、内服しないでください。誤って内服した場合はできるだけ吐き出し、すぐに医師の診察を受けてください。
- (2) 点眼しないでください。本剤または本剤を加えた液が眼に入った場合はすぐに流水で洗い流し、眼科医の診察を受けてください。

- (3) 眼や皮フに刺激や異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

3. 保管及び取り扱いには次のことに注意してください。

- (1) 汚染を避けるため、ボトルの注ぎ口に指や他の器物が触れないように注意してください。また、使用後は速やかにボトルのキャップをしっかりとめてください。
- (2) 誤用を避け品質を保持するために、他の容器に移し替えて使用しないでください。
- (3) 一度使用した液剤は再使用しないでください。
- (4) 使用期限の過ぎたケア用品は絶対に使用しないでください。(使用期限はパッケージやボトルに“EXP”または“”として表示されていますのでご確認ください。)
- (5) 直射日光を避け湿気の少ない状態で、室温保存してください。
- (6) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (7) 開封後はなるべく早く使い切ってください。

品質管理には万全を期しておりますが、
万一製品にお気付きの点がありましたら弊社お客様相談室までご連絡ください。

輸入販売元

ボシュロム・ジャパン株式会社

東京都品川区南大井6-26-2

製品についてのお問い合わせは

 0120-132490

<http://www.renu.jp>

本製品をご使用いただいて万一ご満足いただけない場合は ——
お買い上げレシートをご用意のうえ上記フリーダイヤルまでご連絡ください。
返金または交換をお1人様1回まで承ります。